

# Harvard Ionoconditioner

Kavitás kondicionáló

A **Harvard Ionoconditioner** tisztítja a kavitást és kondicionálja a dentin és fogzománc felületeit, az üveginomer cement jobb tapadásáért.

## Összetétel

Poliakriilsavak oldata

## Ellenjavallatok

A **Harvard Ionoconditioner** nem használható olyan páciensek esetében, akik túlérzékenységet mutatnak valamely alkotórészre. Allergiás reakció fellépése esetén meg kell szakítani a további kezelést, és fel kell szólítani a páciens, hogy konzultáljon egy orvossal!

## Alkalmazás

1. Preparáció után vattapamaccsal vagy ecsettel vigye fel a kezelendő felületre **Harvard Ionoconditioner** kondicionálót, és hagyja hatni 20 mp-ig.
2. Ezután alaposan öblítse le vízzel, és a felszín enyhén szárítsa meg, de ne szárítsa ki!
3. Végül alkalmazhatja az üveginomer cementet.

## Fontos tudnivalók

Kerülni kell a **Harvard Ionoconditioner** bőrre vagy szájnyálkahártyára kerülését! Amennyiben az anyag bőrhöz vagy nyálkahártyához ér, le kell öblíteni bő vízzel!

Szembe kerülés esetén bő vízzel öblítse ki a szemet, és konzultáljon szemorvosával!

## Tárolás

A termék 4 – 25°C között tárolandó.

Ne használja fel a terméket a felhasználhatósági idő lejárata után!

## Kizárólag fogorvosi használatra! Gyermekektől elzárva tartandó!

A használati útmutatót a felhasználás időtartama alatt őrizze meg!

A felhasználó felelős a termék rendeltetésszerű használatáért a használati útmutatóban foglaltak szerint.

Cikkszám 7053000      Harvard Ionoconditioner 5 ml flakon